



ISTRUZIONI DI MISCELAZIONE PER IGNITE®

129596-4

Le seguenti lingue sono incluse in questa confezione:

Italiano (it)

Per altre lingue, visitare il sito web www.wmt.com

Quindi fare clic sull'opzione **Prescribing Information**

(Informazioni sulla prescrizione).

**Per ulteriori informazioni e traduzioni,
contattare il fabbricante o il distributore locale.**



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
5677 Airline Road
Arlington, TN 38002
U.S.A.

EC REP

Wright Medical EMEA
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
The Netherlands

*** Il marchio di conformità CE è applicato per numero di catalogo e compare sull'etichetta esterna, se pertinente.**

Rx ONLY

Settembre 2012
Stampato negli USA.

IGNITE®
STIMOLANTE INIETTABILE PER LA FORMAZIONE
DEL CALLO OSSEO IN SEDE DI FRATTURA
129596-4

Istruzioni per l'uso
 Istruzioni per la miscelatura

PREPARAZIONE DEL SITO*



PASSO 1

Localizzare il difetto sotto guida fluoroscopica utilizzando un ago BLU di calibro 8G e un trocar.



PASSO 2 (facoltativo)

Se si desidera disgregare il tessuto fibroso all'interno del difetto, applicare un movimento in avanti e indietro in senso longitudinale.



PASSO 3

Rimuovere il trocar e inserire il sollevatore IGNITE®, allineando i marcatori prima di agganciarli insieme. Creare uno spazio sottoperiosteale per l'iniezione del materiale d'innesto.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE D'INNESTO



PASSO 4

Usando l'ago calibro 11 VERDE e la siringa, aspirare 20 cc di midollo osseo con tecnica standard. Mettere da parte.



PASSO 5

Rimuovere lo stantuffo BLU dalla siringa da 30 cc. Ruotare quindi in senso orario fino a fissare completamente il portasiringa nel blister.



PASSO 6

Aggiungere aspirato midollare nella siringa da 30 cc.



PASSO 7

Aggiungere attentamente la polvere IGNITE® sull'aspirato midollare.

NOTA: dopo aver unito la polvere IGNITE® all'aspirato midollare, la miscelatura e l'iniezione dovranno essere portate a termine entro 5 minuti.



PASSO 8

Servendosi della spatola in dotazione, mescolare fino ad ottenere una consistenza uniforme.

NOTA: Accertarsi che sul fondo non restino grumi di polvere.



PASSO 9

Ruotare in senso orario per estrarre il cilindro E il cappuccio della siringa dal blister. Collegare saldamente il cappuccio della siringa e inserire delicatamente lo stantuffo BLU nel cilindro della siringa.



PASSO 10

Allentare il cappuccio della siringa. Capovolgere la siringa e far avanzare lo stantuffo per espellere l'aria. Rimuovere il cappuccio della siringa.

INIEZIONE DEL MATERIALE COMPOSITO DA INNESTO



PASSO 11

Collegare la siringa contenente il materiale d'innesto all'ago pre-inserito. Iniettare il materiale composito da innesto IGNITE® nella tasca subperiosteale.

NOTA: Se l'iniezione dovesse risultare difficoltosa, riposizionare l'ago.



PASSO 12

Dopo l'iniezione, lasciare indisturbato l'ago per 3-5 minuti (per ottenere una coagulazione parziale). Estrarre lentamente l'ago a piccoli incrementi, onde ridurre al minimo il rischio di riflusso.

*La responsabilità relativa all'uso di tecniche chirurgiche adeguate ricade sul medico. Le linee guida riportate in precedenza vengono fornite esclusivamente a titolo di tecniche consigliate. Il chirurgo deve valutare l'adeguatezza delle diverse tecniche attingendo alla propria esperienza e alle proprie competenze mediche.

Marchi commerciali TM e marchi registrati [®] di proprietà della Wright Medical Technology, Inc.

Prodotto coperto da uno o più dei seguenti brevetti: Brevetti statunitensi 5.614.206; 5.807.567; 6.030.636. Altri brevetti in corso di omologazione. ©2002 Wright Medical Technology, Inc. Tutti i diritti riservati.