



## microMIG<sup>®</sup> HV

### ISTRUZIONI PER LA MISCELATURA 131915-5

Le seguenti lingue sono incluse in questa confezione:

English (en)

Deutsch (de)

Nederlands (nl)

Français (fr)

Español (es)

Italiano (it)

Português (pt)

中文-Chinese (sch)

Türkçe (tk)

Per altre lingue, visitare il sito web [www.wmt.com](http://www.wmt.com)

Quindi fare clic sull'opzione **Prescribing Information**

(Informazioni sulla prescrizione).

**Per ulteriori informazioni e traduzioni,  
contattare il fabbricante o il distributore locale.**



CE 0086\*

Wright Medical Technology, Inc.  
5677 Airline Rd.  
Arlington, TN 38002  
U.S.A.

EC REP

Wright Medical EMEA  
Krijgsman 11  
1186 DM Amstelveen  
The Netherlands

**\* Il marchio di conformità CE è applicato per numero di catalogo e compare sull'etichetta esterna, se pertinente.**

R<sub>x</sub> ONLY

Novembre 2009  
Stampato negli USA.



microMIIG® HV  
INNESTO INIETTABILE MINIMAMENTE INVASIVO  
ISTRUZIONI PER LA MISCELATURA  
(131915-5)

**IMPORTANTE:** non iniziare prima che il sito d'innesto sia stato preparato e sia pronto per l'iniezione.

**Passo 1**

- Se è previsto l'uso di una piegatrice per aghi, **estrarre prima il trocar in metallo dall'ago.**




**Passo 2**

- Usare la piegatrice per curvare l'ago onde consentire il posizionamento preciso del materiale. Sono disponibili due canali per consentire diverse angolature di curvatura. Inserire l'ago nella fessura IN ALTO per ottenere una curvatura più marcata oppure nella fessura IN BASSO per ottenere una curvatura meno marcata.



**Passo 3**

- Estrarre lo stantuffo dalla siringa, metterlo da parte.

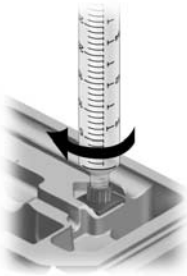

**Passo 4**

- Collegare la siringa al cappuccio per siringa rosso pre-inserito nella vaschetta.



**Passo 5**

- Inserire l'imbuto fornito in dotazione nella siringa.
- Versare il diluente nella siringa.

**NOTA:** eseguire i passi da 6 a 10 entro 5 minuti.


**Passo 6**

- Tenendo l'imbuto in posizione, versare attentamente tutta la polvere nella siringa.
- Estrarre l'imbuto.



#### Passo 7

- Usare la spatola fornita in dotazione per miscelare la polvere e la soluzione per **1 minuto**. La rotazione della spatola tra le dita può agevolare il processo di miscelatura.

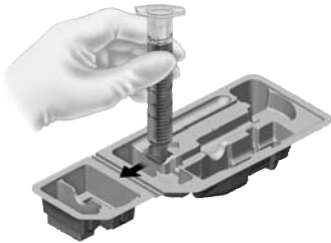

#### Passo 8

- Rimuovere dalla vaschetta la siringa con il cappuccio (sinistra).
- Inserire lo stantuffo nel cilindro della siringa fino a superare il primo punto di "innesto".
- Capovolgere la siringa e picchiettarla delicatamente per far sì che l'aria in eccesso fluisca verso la sezione superiore della siringa (destra).



#### Passo 9

- Rimuovere dalla siringa il cappuccio rosso.
- **Prima del collegamento all'ago di erogazione, spingere lo stantuffo finché nella siringa non rimangono 4 cc di materiale.**

#### Passo 10

- Collegare la siringa all'ago.
- Iniettare la pasta nel sito del difetto.
- Evitare di riempire eccessivamente la cavità ossea e di comprimere il sito di trattamento.

NOTA: l'innesto iniettabile microMIIG® HV si solidifica *in situ* in circa 22-30 minuti.

*All'interno della siringa potrebbe rimanere del materiale residuo. Il quantitativo di materiale residuo presente può essere correlato alle dimensioni del difetto e alle modalità d'uso del materiale.*