



microMIG® HV

INSTRUÇÕES DE MISTURA 131915-5

Os seguintes idiomas estão incluídos nesta embalagem:

English (en)

Deutsch (de)

Nederlands (nl)

Français (fr)

Español (es)

Italiano (it)

Português (pt)

中文-Chinese (sch)

Türkçe (tk)

Visite o nosso website www.wmt.com para outros idiomas.

Em seguida, clique na opção **Prescribing Information**
(informações de prescrição).

**Para informações adicionais e traduções
contacte o fabricante ou o distribuidor local.**



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
5677 Airline Rd.
Arlington, TN 38002
U.S.A.

EC REP

Wright Medical EMEA
Krijgsman 11
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

* A marcação de conformidade CE é aplicada por número de catálogo e aparece no rótulo exterior, se aplicável.

Rx ONLY

Novembro de 2009
Impresso nos EUA

microMIIG® HV
ENXERTO INJECTÁVEL MINIMAMENTE INVASIVO
INSTRUÇÕES DE MISTURA
(131915-5)

IMPORTANTE: não começar até que o local do enxerto esteja preparado e pronto para a injeção.

Etapa 1

- Se utilizar o curvador de agulha, **retirar primeiro o trocarte de metal da agulha.**




Etapa 2

- Utilizar o curvador para dobrar a agulha, permitindo a colocação precisa do material. Existem dois canais que permitem vários graus de curvatura. Introduzir a agulha na ranhura SUPERIOR para obter uma curvatura mais agressiva ou na ranhura INFERIOR para obter uma curvatura mais suave.



Etapa 3

- Retirar o êmbolo da seringa e colocar de lado.

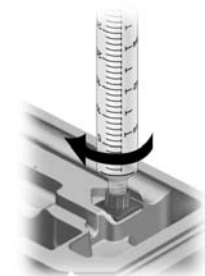

Etapa 4

- Fixar a seringa à tampa vermelha da seringa pré-posicionada na bandeja.



Etapa 5

- Introduzir o funil fornecido na seringa.
- Verter diluente na seringa.

OBSERVAÇÃO: efectuar as etapas 6 a 10 no prazo de cinco minutos.


Etapa 6

- Após o funil estar posicionado, verter cuidadosamente a totalidade do pó para o interior da seringa.
- Retirar o funil.



Etapa 7

- Utilizar a espátula fornecida para misturar o pó e a solução em conjunto durante **um minuto**. Rodar a espátula entre os dedos pode auxiliar o processo de mistura.

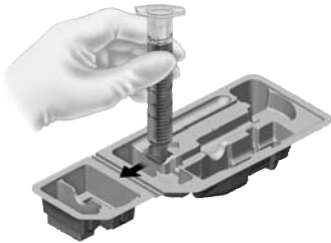

Etapa 8

- Retirar a seringa juntamente com a tampa da bandeja (esquerda).
- Introduzir o êmbolo no cilindro da seringa além do primeiro “batente”.
- Dar umas pancadinhas ligeiras na seringa numa posição invertida para deslocar o excesso de ar para a parte superior da seringa (direita).



Etapa 9

- Retirar a tampa vermelha da seringa.
- **Antes de efectuar a ligação com a agulha de administração, fazer avançar o êmbolo até que restem 4 cc de material na seringa.**

Etapa 10

- Fixar a seringa à agulha.
- Injectar a pasta no local do defeito.
- Evitar o preenchimento em excesso de cavidades ósseas ou a compressão do local de tratamento.

OBSERVAÇÃO: o enxerto injectável microMIIG® HV endurecerá em cerca de 22 a 30 minutos *in situ*.

O material residual pode ser deixado na seringa. A quantidade de material restante pode dever-se a um defeito de tamanho e de utilização do material.