



骨髓穿刺套装

150818-0

本包装内有以下语言说明:

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)	Français (fr)
Español (es)	Italiano (it)	Português (pt)	中文- Chinese (sch)
Türkçe (tk)			

欲了解其它语言的说明, 请访问我们的网站www.wmt.com.

然后点击 **Prescribing Information** (处方信息) 选项。

有关额外信息和翻译版本, 请与制造商或当地经销商联系。



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.



Wright Medical UK Ltd
3rd Avenue
Letchworth
Herts, SG6 2JF
UK

*如果某产品符合CE合格标志要求, 会在外标签上印刷CE标志。

R ONLY

2013年10月
美国印刷

骨髓穿刺(BMA)套装

(150818-0)

一般产品信息

骨髓抽吸套件包含BMA抽吸所需的设备。

采用适当的手术技术是医务人员的责任。以下指南只能作为推荐的方法使用。每位外科医生都必须根据各自的医学训练和经验评估技术是否适宜。

适应症

骨髓抽吸套件是一种活塞式注射器，可用于抽取骨髓、自体血液、血清或其它体液。可用注射器将移植材料与抽吸液混合，将混合的移植材料输送至骨科手术部位。

警告

下列警告适用：

- 每个单位仅供单个患者使用。
- 如果包装受损，则不得使用本装置。
- 应当正确地丢弃未使用的产品。
- 不得再次灭菌处理骨髓穿刺套装。

注意事项

只要包装未被打开和/或未被损坏，在标明的存放期内骨髓穿刺套装都保持无菌状态。本产品必须在过期日之前使用。应当正确丢弃未使用或过期的产品。

目前尚未评估此装置在磁共振（MR）环境中的安全性和兼容性。目前尚未测试此装置在磁共振（MR）环境中的加热或移动状况。

处理和使用

骨髓穿刺套装采用无菌包装供货，在内包装未被打开或未被损坏的情况下应视为是无菌的。本产品不应再次灭菌。本套装只供单个患者使用，严禁重复使用。

以下说明仅供参考。抽吸位置由外科医生决定：

1. 准备穿刺部位

按从髌嵴抽取骨髓准备穿刺部位并铺巾。触及髌前上嵴。

定位：定位在髌前上嵴后**1 cm**处可避免伤及大腿股外侧皮神经。

2. 插入穿刺针

将穿刺针插入髌前上嵴的中央位置，小心避免穿透外侧悬唇。

3. 准备抽吸

取出套管针芯，将抽吸注射器接在穿刺针上。

4. 抽吸骨髓

开始抽吸红骨髓。如果骨髓不容易抽吸，则稍稍调整穿刺针的位置。如果还是不能抽吸到骨髓，则取下注射器，重新放好套管针芯并按照步骤1-4重新穿刺。

5. 重新穿刺，继续抽吸

为了避免抽吸到外周血液，每抽吸5 ml骨髓后须重新穿刺。

无菌

骨髓穿刺套装的所有组件均以无菌方式供货。

本产品仅供单次使用，且不应再次灭菌处理。标签注明为只可单次使用的装置绝对不可重复使用。重复使用这些装置也许会导致严重患者伤害。与重复使用这些装置有关的危险性例子包括但不限于：装置性能显著受损、交叉感染和污染。

警告：（美国）联邦法律规定，此装置只能由医生销售、分销和使用或根据医嘱销售、分销和使用。