



KEMİK İLİĞİ ASPIRASYONU KITI 150818-0

Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

| | | | |
|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
| English (en) | Deutsch (de) | Nederlands (nl) | Français (fr) |
| Español (es) | Italiano (it) | Português (pt) | 中文- Chinese (sch) |
| Türkçe (tk) | | | |

Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com

Sonra **Prescribing Information**

(Reçeteleme Bilgisi) seçeneğine tıklayın.

**Ek bilgi ve tercüme için lütfen üretici veya yerel
distribütör ile irtibat kurun.**



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC REP

Wright Medical UK Ltd
3rd Avenue
Letchworth
Herts, SG6 2JF
UK

* CE-Uyumluluk İşareti katalog numarası başına uygulanır ve ilgili olduğu durumlarda dıştaki etikette görülür.

R ONLY

Ekim 2013
A.B.D.'de basılmıştır

Kemik İliđi Aspirasyon (BMA) Kiti

(150818-0)

ÜRÜNE AİT GENEL BİLGİLER

Kemik İliđi Aspirasyon Kitinde BMA aspirasyonu için gerekli ekipmanlar bulunur.

Uygun cerrahi teknik tıbbi uzmanın sorumluluğundadır. Burada verilen kılavuz ilkeler sadece tavsiye niteliğindeki tekniklerdir. Her cerrah, kullanılan tekniklerin uygunluğunu kişisel tıp eğitimi ve deneyimleri doğrultusunda değerlendirmelidir.

ENDİKASYONLAR

Kemik İliđi Aspirasyon Kiti kemik iliđi, otologöz kan, plazma ve diđer vücut sıvılarının aspirasyonunda pistonlu şırınga olarak kullanım amacına yöneliktir. Şırınga, kemik grefti maddeleri ile aspire edilen sıvıları karıştırmak ve ortopedik cerrahi bölgesine kompozit greft maddesi enjekte etmek için kullanılabilir.

UYARILAR

Aşağıdaki uyarılar geçerlidir:

- Her ünitenin sadece tek hastada kullanılması amaçlanmıştır.
- Ambalaj hasarlıysa ürünü kullanmayın.
- Kullanılmamış ürün uygun şekilde atılmalıdır.
- KEMİK İLİĐİ ASPİRASYON KİTİNİ TEKRAR STERİLİZE ETMEYİN.

ÖNLEMLER

Kemik İliđi Aspirasyon Kiti belirtilen raf ömrü boyunca ambalaj açılmadığı ve/veya hasar görmediđi sürece sterilidir. Ürün son kullanma tarihinden önce kullanılmalıdır. Kullanılmamış veya son kullanım tarihi geçmiş ürün uygun şekilde atılmalıdır.

Bu cihaz MR ortamında güvenlik ve uyumluluk açısından değerlendirilmemiştir. Bu cihaz MR ortamında ısınma veya göçme açısından test edilmemiştir.

KULLANIM

Kemik İliđi Aspirasyon Kiti steril olarak sağlanır ve iç ambalajı açık veya hasarlı olmadıkça steril olduğu kabul edilmelidir. Bu ürün tekrar steril edilmemelidir. Kitler tek bir hastada kullanım içindir ve tekrar kullanılmaması gerekir.

Aşağıdaki talimatlar sadece bilgi amaçlıdır. Aspirasyon yapılacak yer cerrahın takdirine göre belirlenir:

1. Bölgeyi Hazırlayın

Bölgeye iliyak krest grefti alınması için uygun şekilde hazırlayıp örtün. Anterior iliyak krestini palpe edin.

Yerleştirme: Anterior superior spina iliyakaya 1 cm posterior yerleştirme üst bacağın lateral femoral kütanöz sinirinin hasar görmesini önleyecektir.

2. İğneyi yerleştirin

Aspirasyon iğnesini krestin merkez konumuna, lateral üste sarkan kenarı penetre etmekten kaçınarak yerleştirin.

3. Aspirasyon hazırlığı yapın

Trokarı çıkarın ve aspirasyon şırıngasını iğneye yerleştirin.

4. Kemik iliği aspirasyonu yapın

Kırmızı ilik aspirasyonuna başlayın. İlik kolayca aspire edilemezse iğnenin yerini biraz değiştirin. İlik halen aspire edilemezse şırıngayı çıkartıp trokarı değiştirip 1-4 adımları izleyerek iğneyi tekrar yönlendirin.

5. Tekrar yönlendirin, aspirasyona devam edin

Periferel kan aspirasyonunu önlemek için iğneyi aspirasyon sırasında 5 ml'de bir tekrar yönlendirin.

STERİLİTE

Kemik İliği Aspirasyon Kitinin tüm bileşenleri steril olarak sağlanır.

Bu ürün sadece tek kullanımlıktır ve tekrar sterilize edilmemelidir. Sadece tek kullanımlık olarak etiketlenmiş cihazlar asla tekrar kullanılmamalıdır. Bu cihazların tekrar kullanılması hastanın ciddi şekilde zarar görmesiyle sonuçlanabilir. Bu cihazların tekrar kullanılmasıyla ilişkili tehlikeler arasında verilenlerle sınırlı olmamak üzere şunlar vardır: cihaz performansında önemli ölçüde bozulma, çapraz enfeksiyon ve kontaminasyon.

DİKKAT: A.B.D. federal yasaları uyarınca bu cihaz sadece bir doktor tarafından veya bir doktorun isteği üzerine satılabilir, dağıtılabılır veya kullanılabilir.