



OSTEOSET® RESORBABLE BEAD KITS AND MINI-BEAD KITS

MIXING INSTRUCTIONS 150834-0

本包装内有以下语言说明：

English (en)

Deutsch (de)

Nederlands (nl)

Français (fr)

Español (es)

Italiano (it)

Português (pt)

中文-Chinese (sch)

Türkçe (tk)

欲了解其它语言的说明，请访问我们的网站www.wmt.com。

然后点击 **Prescribing Information**

(处方信息) 选项。

有关额外信息和翻译版本，请与制造商或当地经销商联系。



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC REP

Wright Medical UK Ltd
3rd Avenue
Letchworth
Herts, SG6 2JF
UK

* 如果某产品符合CE合格标志要求，
会在外标签上印刷CE标志。

Rx ONLY

1 2013年10月
美国印刷

OSTEOSET® 可重吸收珠粒工具包混合说明 (150834-0)

1. 请按照步骤 1~5 的指导进行混合。

注： 不要向糊剂中添加任何其它物质。使用其它混合液和/或向混合物中添加其它物质可能显著改变凝固时间。骨髓和血液等物质将妨碍糊剂凝固在一起



步骤 1

- 将粉剂添加到混合碗中
- 加入全部稀释液
- 使其凝固
 - 标准工具包：1 分钟
 - 快速固化工具包：30 秒钟



步骤 2

- 充分混合 30 - 45 秒钟
- 切勿混合过度
- 当混合物的稠度呈糊状（即粘结在调拌刀上）时，即可加入模具之中




步骤 3

- 使用调拌刀往 Wright 珠粒模具底半部均匀涂抹一层硫酸钙糊剂（如图示），确保完全填满每个珠粒空腔。每套 OSTEOSET® 可重吸收珠粒工具包均含有足够填充两个珠粒模具的材料。



步骤 4

- 装上模具顶盖并紧紧按压在一起（多余的材料将从模具顶盖上的孔中挤出）。使其凝固：
标准工具包：大约 15-20 分钟
快速固化工具包：大约 3-5 分钟
- 小心地将模具分开

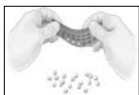

步骤 5

- 弯曲模具，以方便取出珠粒

2. 将模制植入物轻轻塞入治疗部位。避免将骨腔填得过满或者压迫治疗部位。

3. 将多余的材料从治疗部位清除掉。使用皮质骨窗和/或健康骨膜或其它软组织覆盖骨腔开口。应用标准缝合技术关闭手术部位。

4. 丢弃任何未用完的 OSTEOSET® 可重吸收珠粒工具包材料和混合工具。

OSTEOSET® 微型可重吸收珠粒工具包混合说明

1. 请按照步骤 1~5 的指导进行混合。

注： 不要向糊剂中添加任何其它物质。使用其它混合液和/或向混合物中添加其它物质可能显著改变凝固时间。骨髓和血液等物质将妨碍糊剂凝固在一起。



步骤 1

- 将粉剂添加到混合碗中
- 加入全部稀释液
- 使其凝固
 - 标准工具包：1 分钟
 - 快速固化工具包：30 秒钟




步骤 2

- 充分混合 30 - 45 秒钟
- 切勿混合过度
- 当混合物的稠度呈糊状（即粘结在调拌刀上）时，即可加入模具之中



步骤 3

- 使用调拌刀将 OSTEOSET® 糊剂均匀地在提供的模具（仅一半）上涂抹一层
- 确保完全填满每个珠粒空腔。
注意：每套工具包均包含足够填充一半提供模具的材料，总量大约为 5cc 配制量。
- 在完全填满模具一半之后，将其在一个平面上轻轻磕击以除去气泡。

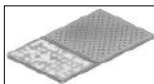

步骤 4

使其凝固：

- 标准工具包：大约 15-20 分钟
- 快速固化工具包：大约 3-5 分钟



步骤 5

- 弯曲模具，以方便取出珠粒

2. 将模制植入物轻轻塞入治疗部位。避免将骨腔填得过满或者压迫治疗部位。

3. 将多余的材料从治疗部位清除掉。使用皮质骨窗和/或健康骨膜或其它软组织覆盖骨腔开口。应用标准缝合技术关闭手术部位。

4. 丢弃任何未用完的 OSTEOSET® 微型可重吸收珠粒工具包材料和混合工具。