



Blandningsanvisningar för IGNITE[®]

150830-0

Följande språk ingår i detta paket:

| | | | |
|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| English (en) | Deutsch (de) | Nederlands (nl) | Français (fr) |
| Español (es) | Italiano (it) | Português (pt) | 中文-Chinese (sch) |
| Türkçe (tk) | | | |

För ytterligare språk ska du besöka vår webbplats på www.wmt.com.


Klicka sedan på alternativet **Prescribing Information** (förskrivningsinformation).

För ytterligare information och översättningar ska du kontakta tillverkaren eller en lokal återförsäljare.



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

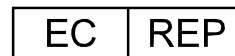

Wright Medical UK Ltd
3rd Avenue
Letchworth
Hertfordshire, SG62JF
UK

* **CE-märkningen för överensstämmelse tillämpas i enlighet med beställningsnummer och visas på ytteretiketten, om tillämpligt.**

Rx ONLY
Oktober 2013
Tryckt i USA

IGNITE®

Injicerbar stimulans för kallusbildning vid fraktur
150830-0

Bruksanvisning

Blandningsanvisningar

OBS! Dessa anvisningar är specifika för användning av benmärgsaspirat. Den medföljande sterila vattenspädningen kan ersättas med benmärgsaspirat. Om steril vattenspädning används sker injektionen direkt från sprutan.

FÖRBEREDELSE AV STÄLLET*

STEG 1

Lokalisera defekten under genomlysning med BLÅ 8 G nål och troakar.



STEG 2 (valfritt)

Om mellanliggande bindväv önskas inom defekten ska du använda en långsgående, svepande rörelse.



STEG 3

Ta bort troakaren och för in IGNITE®-elevatoren, ställ in markörerna eller handtaget i linje innan de knäpper ihop. Skapa ett subperiostalt utrymme för injektion av graftet.



FÖRBEREDELSE AV GRAFTET

STEG 4

Använd den GRÖNA 11 G nålen och sprutan och aspirera 20 ml benmärg med standardteknik.¹ Sätt det åt sidan.

OBS! För att åstadkomma och upprätthålla vakuum drar du tillbaka sprutkolven till önskat läge och vrider kolven medurs för att placera en av stoppribborna bakom stopptappen. Vrid kolven moturs för att frigöra den.



¹ Om så önskas kan den medföljande sterila vattenspändningen ersättas med benmärgsaspirat.

STEG 5

Ta bort ben BLÅ kolven från 30 ml sprutan. Sedan vrider du medurs tills den sitter helt säker i sprutstället i blåsan.



STEG 6

Tillsätt benmärgsaspirat i 30 ml sprutan.



STEG 7

Tillsätt försiktigt IGNITE®-pulver ovanpå benmärgsaspiratet.
OBS! När IGNITE®-pulvret väl är kombinerat med benmärgsaspiratet bör blandning och injicering slutföras inom 5 minuter.



STEG 8

Blanda till en jämn konsistens med den tillhandahållna spateln.

OBS!

Se till att inga klumpar av pulver blir kvar på botten.



STEG 9

Vrid och dra sprutcylindern OCH locket med en medurs rörelse från blåsan. Sätt fast sprutlocket och för försiktigt in den BLÅ kolven i sprutcylindern.



STEG 10

Lossa sprutlocket. Avlägsna luften genom att vända sprutan upp och ned och föra fram kolven. Ta bort sprutlocket.




INJICERA GRAFTKOMPOSITEN

STEG 11

Om steril vattenspädning används injicerar du materialet direkt från sprutan. Injicera inte genom en 8 G nål.

Koppla graftsprutan på en på förhand placerad nål. Injicera IGNITE® graftkompositen i den subperiostala fickan.

OBS! Om injektionen verkar svår ska du flytta nålen.

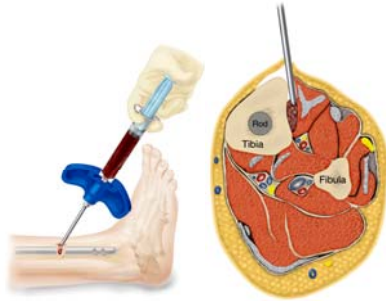

STEG 12

Efter injiceringen måste nålen lämnas ostörd i 3-5 minuter (för partiell koagulation). Dra långsamt ut nålen i små steg för att minimera backflöde.



*Läkaren är ansvarig för att välja lämplig kirurgisk teknik. Nedanstående riktlinjer beskriver endast rekommenderade tekniker. Varje enskild kirurg måste utvärdera om teknikerna är lämpliga med tanke på individuell medicinsk utbildning och sakkunskap.

™ Varumärken och ® registrerade märken som tillhör Wright Medical Technology, Inc. De omfattas av ett eller flera av följande patent. USA-patent 5,614,206; 5,807,567; 6,030,636. Sökta patent. ©2002 Wright Medical Technology, Inc. Alla rättigheter förbehålles.

150830-0
(10/13)