



FR

MIIG® 115 INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE

128800-6

Les langues suivantes sont incluses dans ce paquet:

Français (fr)

Pour d'autres langues, veuillez visiter notre site web www.wmt.com

Puis cliquez sur l'option **Prescribing Information**

(Informations pour la prescription).

**Pour des informations et traductions complémentaires, veuillez
contacter le fabricant ou le distributeur local.**



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
5677 Airline Rd.
Arlington, TN 38002
U.S.A.

EC REP

Wright Medical EMEA
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
The Netherlands

* Le marquage CE de conformité est utilisé par numéro de catalogue et apparaît sur l'étiquette externe, le cas échéant.

Rx ONLY

Août 2012

Imprimé aux États-Unis



Étape 4

- En cas d'utilisation de la seringue miniMIIG™, insérer l'entonnoir fourni dans la seringue.
- Verser toute la solution saline fournie dans la seringue.



Étape 5

IMPORTANT: LES ÉTAPES 5 À 8 DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES EN 1 MINUTE AU MAXIMUM.

- Verser avec précaution toute la poudre sur le liquide.




Étape 6 (à effectuer en 40 secondes environ)

- En cas d'utilisation de la seringue miniMIIG™, retirer l'entonnoir.
- Mélanger la poudre et la solution avec la spatule fournie. Faire « pivoter » la spatule entre les doigts peut faciliter le processus de mélange.




IMPORTANT: ce matériau prend environ 30 secondes pour s'imbiber d'eau. Il est très important de ne pas ajouter plus de liquide dans la seringue.

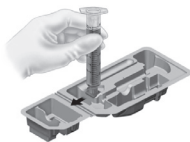

Étape 7

- Retirer la seringue du support.
- Insérer le piston dans le corps de la seringue.
- Tapoter doucement la seringue en la renversant de façon à déplacer l'excès d'air vers le haut (droite).



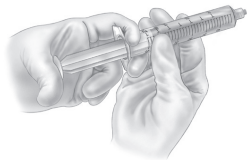

Étape 8

- Retirer le bouchon rouge de la seringue.
- Avant de connecter l'aiguille d'application, retirer l'excès d'air en avançant le piston jusqu'au volume indiqué sur la seringue:
- **miniMIIG™ = 5 cc**
- **MIIG™ 115 = 15 cc**



Étape 9

- Fixer la seringue à l'aiguille prépositionnée.
- Injecter immédiatement la pâte dans le site du défaut.
- Éviter de trop combler le vide osseux ou de comprimer le site de traitement.

Du matériau résiduel peut rester dans la seringue. La quantité de matériau restant est fonction de l'adhésion par l'utilisateur aux temps de mélange et d'éjection indiqués dans ces instructions.

REMARQUE:

Laisser la pâte prendre avant le placement définitif des dispositifs (environ 5 à 7 minutes).