



IT

MIIG[®] 115

ISTRUZIONI PER LA MISCELATURA

128800-6

Le seguenti lingue sono incluse in questa confezione:

Italiano (it)

Per altre lingue, visitare il sito web www.wmt.com

Quindi fare clic sull'opzione **Prescribing Information**

(Informazioni sulla prescrizione).

**Per ulteriori informazioni e traduzioni, contattare il fabbricante
o il distributore locale.**



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
5677 Airline Rd.
Arlington, TN 38002
U.S.A.

EC REP

Wright Medical EMEA
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
The Netherlands

* Il marchio di conformità CE è applicato per numero di catalogo e compare sull'etichetta esterna, se pertinente.

R_x ONLY

Agosto 2012
Stampato negli USA



Passo 4

- Se si utilizza la siringa miniMIIG™, inserire l'imbuto in dotazione nella siringa
- Versare tutta la soluzione salina fornita nella siringa.



Passo 5

IMPORTANTE: I PASSI 5 – 8 VANNO COMPLETATI ENTRO 1 MINUTO AL MASSIMO.

- Versare con cura tutta la polvere sopra al liquido.



Passo 6 (da completare in circa 40 secondi)

- Se si utilizza il kit miniMIIG™, rimuovere l'imbuto
- Usare la spatola fornita in dotazione per miscelare la polvere e la soluzione insieme. La "rotazione" della spatola tra le dita può agevolare il processo di miscelatura.




IMPORTANTE: il presente materiale impiega approssimativamente 30-60 secondi per "essicarsi". È estremamente importante astenersi dall'aggiungere ulteriore liquido alla siringa.



Passo 7

- Estrarre la siringa dal supporto
- Inserire lo stantuffo nel cilindro della siringa.
- Capovolgere la siringa e picchiettarla delicatamente per far sì che l'aria in eccesso fluisca verso la sezione superiore della siringa (destra).



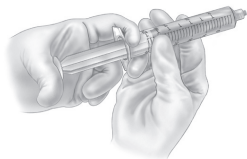

Passo 8

- Rimuovere dalla siringa il cappuccio rosso.
- Prima del collegamento all'ago di erogazione, rimuovere l'aria in eccesso facendo avanzare lo stantuffo fino al volume indicato nella siringa:
 - **miniMIG™ = 5 cc**
 - **MIIG™115 = 15 cc**



Passo 9

- Collegare la siringa all'ago pre-inserito.
- Iniettare immediatamente la pasta nel sito del difetto.
- Evitare di riempire eccessivamente la cavità ossea e di comprimere il sito di trattamento.

All'interno della siringa potrebbe rimanere del materiale residuo. Il quantitativo di materiale residuo presente dipende dall'osservanza da parte dell'utente dei tempi di miscelatura e di iniezione specificati nelle presenti istruzioni.

NOTA:

è necessario attendere che la pasta si sia solidificata prima di procedere all'impianto di componenti permanenti (circa 5-7 minuti).