

1. Προετοιμασία της θέσης

Προετοιμάστε και καλύψτε τη θέση όπως κατά τη λήψη μοσχεύματος από τις λαγόνιες ακρολοφίες. Ψηλαφήστε την πρόσθια μοίρα της λαγόνιας ακρολοφίας.

Τοποθέτηση: 1 εκατοστό πίσω από την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, ώστε να αποφευχθεί ο τραυματισμός του έξω μηροδερματικού νεύρου.

2. Εισαγωγή της βελόνας

Εισαγάγετε τη βελόνα αναρρόφησης στο κέντρο της ακρολοφίας, προσέχοντας ώστε να αποφύγετε τυχόν διάτρηση του πλάγιου χείλους.

3. Προετοιμασία για αναρρόφηση

Αφαιρέστε το τροκάρ και τοποθετήστε τη σύριγγα αναρρόφησης στη βελόνα.

4. Αναρρόφηση μυελού των οστών

Αρχίστε την αναρρόφηση ερυθρού μυελού. Εάν η αναρρόφηση μυελού δε γίνεται εύκολα, μετακινήστε ελαφρώς τη βελόνα. Εάν ακόμη δε γίνεται αναρρόφηση μυελού, αναπροσανατολίστε τη βελόνα αφαιρώντας τη σύριγγα, επανατοποθετώντας το τροκάρ και ακολουθώντας τα βήματα 1-4.

5. Αναπροσανατολισμός και συνέχιση της αναρρόφησης

Αναπροσανατολίστε τη βελόνα κάθε 5 ml κατά τη διάρκεια της αναρρόφησης, ώστε να αποφύγετε τυχόν αναρρόφηση περιφερικού αίματος.

ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ

Όλα τα εξαρτήματα του κιτ αναρρόφησης μυελού των οστών παρέχονται στείρα.

Αυτό το προϊόν προορίζεται για μία χρήση μόνον και δε θα πρέπει να επαναποστειρώνεται. Συσκευές οι οποίες επισημαίνονται με την ένδειξη «μόνο για μία χρήση» δεν πρέπει ποτέ να ξαναχρησιμοποιηθούν. Η επαναχρησιμοποίηση αυτών των συσκευών ενδέχεται δυνητικά να προκαλέσει σοβαρή βλάβη του ασθενούς. Πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την επαναχρησιμοποίηση αυτών των συσκευών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: σημαντική μείωση της απόδοσης της συσκευής, επιλοίμωξη και μόλυνση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά, διανομή και χρήση αυτής της συσκευής από ιατρό, ή κατόπιν εντολής ιατρού.