










#### Trin 4


Lad det hvile:

- **Standardsæt: ca. 15-20 minutter**
- **Hurtigthærdende sæt: ca. 3-5 minutter**

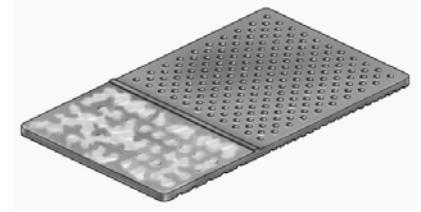

#### Trin 5

- Vrid formen for at lette fjernelsen af perler

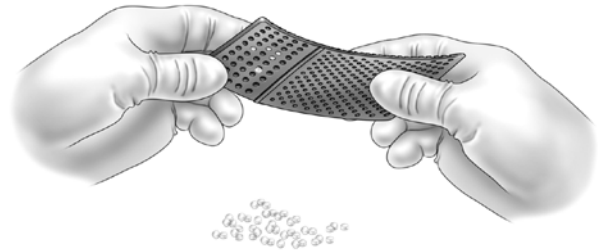

2. Læg forsigtigt de støbte implantater ind i behandlingsstedet. Undgå at overfylde knogletomrummet eller at komprimere behandlingsstedet.
3. Fjern overskydende materiale fra behandlingsstedet. Dæk knogletomrummets åbning til med den kortikale knogles åbning og/eller sund periost eller andet blødvæv. Luk stedet under anvendelse af standard lukketeknikker.
4. Kasser eventuelt ubrugt OSTEOSSET<sup>®</sup> resorberbart miniperlesætmaterialer sammen med blandeværktøjerne.