


Βήμα 4


Αφήστε το για λίγη ώρα:

- **Τυπικό κιτ: περίπου 15-20 λεπτά**
- **Κιτ ταχείας σταθεροποίησης: περίπου 3-5 λεπτά**

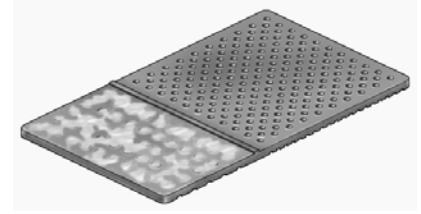

Βήμα 5

- Κάμψτε τη μήτρα για διευκόλυνση της αφαίρεσης των σφαιριδίων

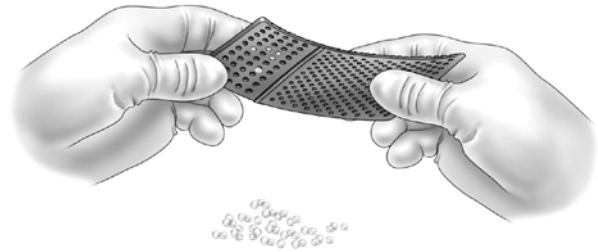

2. Πληρώστε απαλά τα διαμορφωμένα εμφυτεύματα στη θέση θεραπείας. Αποφεύγετε την υπερπλήρωση του οστικού κενού ή τη συμπίεση της θέσης επέμβασης.
3. Αφαιρέστε κάθε ποσότητα υλικού που περισσεύει από τη θέση θεραπείας. Καλύψτε το άνοιγμα του οστικού κενού με στρώμα φλοιώδους οστού ή και υγιές περίοστεο ή άλλο μαλακό ιστό. Κλείστε τη θέση επέμβασης με τη χρήση τυπικών τεχνικών κλεισίματος.
4. Απορρίψτε οποιαδήποτε ποσότητα μη χρησιμοποιημένου υλικού του μίνι κιτ απορροφήσιμων σφαιριδίων OSTEOSET[®] και απορρίψτε και τα εργαλεία ανάμειξης.