



PRO-DENSE™ KNOCHENTRANSPLANTATERSATZ

MISCHANLEITUNG

154099-1

Dieses Paket enthält die folgenden Sprachen:

English (en)

Deutsch (de)

Nederlands (nl)

Français (fr)

Español (es)


Italiano (it)

Português (pt)

Türkçe (tk)

Weitere Sprachen finden Sie auf unserer Website www.wright.com. Klicken Sie auf die Option **Prescribing Information** (Verschreibungsangaben).

Für weitere Informationen und Übersetzungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren zuständigen Vertriebspartner.

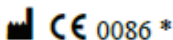

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.



Tornier S.A.S
161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
France

*** Die CE-Konformitätskennzeichnung gilt für spezifische Katalognummern und befindet sich sofern zutreffend auf dem Außenetikett.**

Rx ONLY

Juli 2018
Gedruckt in den USA.

PRO-DENSE™
KNOCHENTRANSPLANTATERSATZ
(154099-1)

DE

HINWEIS: Dem Transplantatmaterial keine sonstigen Substanzen zugeben. Die Verwendung von anderen Mischflüssigkeiten und/oder der Zusatz von anderen Substanzen zur Mischung kann sich auf die Sicherheit, Wirksamkeit und Aushärtung dieses Produktes auswirken.

1. Den Metall-Crimpverschluss vom Fläschchen mit Lösung abnehmen. Die Mischspritze mit dem GRAUEN Adapter am Pulverbehälter anbringen und den Mischstab zurückziehen.



2. Den Behälter umdrehen und leicht darauf klopfen, um das GESAMTE Pulver in die Mischspritze zu befördern. Den Pulverbehälter abnehmen.



3. Den Stopfen aus dem Fläschchen nehmen und die **GESAMTE** Lösung in die Mischspritze geben.



4. Den **GRAUEN** Adapter abnehmen und die **WEISSE** Mischkappe aufsetzen. Die Kolbenhülle abnehmen, indem sie am griffseitigen Ende zuerst vom Mischstab gezogen wird.




5. 30 Sekunden lang mischen, indem der Mischstab unter Drehbewegungen vor und zurück geschoben wird. **Dabei unbedingt darauf achten, dass auch das trockene Pulver am vorderen und hinteren Ende der Spritze untergemischt wird.**



Hinweis: Die Masse innerhalb von 5 Minuten injizieren.

- Den Mischstab vollständig zurückziehen und die Luer-Kappe abnehmen. Die Kolbenhülse wieder am Mischstab anbringen, indem das vordere Ende zuerst auf den Kolben gesetzt wird, bevor man die Hülse einrasten lässt.

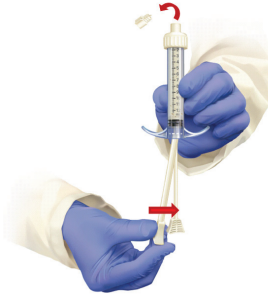

- Das vorgesehene Zubehör, Nadel oder Kanüle aufsetzen. Das Transplantatmaterial in den Knochendefekt injizieren.



Hinweis: Das Transplantatmaterial bindet in etwa 20 bis 30 Minuten ab.

HINWEIS: Eventuell verbleibt ein Rest des Materials in der Spritze. Wie viel Material in der Spritze zurückbleibt, hängt davon ab, wie genau die Misch- und Injektionszeiten in dieser Anleitung eingehalten wurden.