



SUBSTITUT OSSEUX PRO-DENSE™

INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE


154101-0

Les langues suivantes sont incluses dans ce paquet :

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)	Français (fr)
Español (es)	Italiano (it)	Português (pt)	Türkçe (tk)

Pour d'autres langues, visiter notre site web www.wright.com. Puis cliquer sur l'option **Prescribing Information** (Informations de prescription).

Pour des informations et traductions complémentaires, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur local.

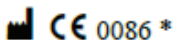

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC	REP
----	-----

Tornier S.A.S
161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
France

*** Le marquage CE de conformité est utilisé par numéro de catalogue et apparaît sur l'étiquette externe, le cas échéant.**

R_x ONLY

Juillet 2018
Imprimé aux États-Unis.

REMARQUE : Ne pas ajouter de substances supplémentaires à la greffe. L'utilisation d'autres solutions de mélange ou l'ajout d'autres substances au mélange peuvent altérer l'innocuité, l'efficacité et la prise de ce produit.

1. Retirer le sertissage métallique du flacon à solution. Fixer la seringue de mélange au réservoir à poudre avec l'adaptateur **ROUGE** et tirer la tige mélangeuse vers l'arrière.



2. Renverser le réservoir et tapoter pour transférer TOUTE la poudre dans la seringue de mélange. Retirer le réservoir à poudre.




3. Retirer le bouchon du flacon et ajouter TOUTE la solution dans la seringue de mélange.



4. Retirer l'adaptateur ROUGE et fixer le bouchon de mélange BLANC. Retirer le manchon du piston en déconnectant d'abord l'extrémité de la poignée de la tige mélangeuse.




5. Mélanger pendant 30 secondes en déplaçant la tige mélangeuse d'avant en arrière tout en tournant. **Assurez-vous de briser et d'incorporer « le bloc » de poudre près de l'arrière et de l'avant de la seringue.**

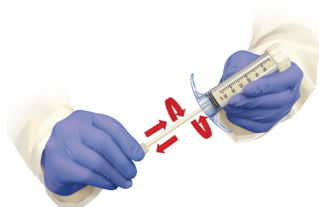

Remarque : Injecter la pâte dans les 5 minutes.

6. Tirer la tige mélangeuse **complètement** vers l'arrière et retirer le bouchon de mélange. Remettre le manchon du piston sur la tige mélangeuse en plaçant d'abord l'extrémité avant sur le piston avant de l'enclencher.

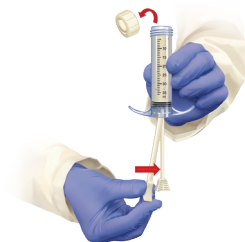

7. Relier la seringue d'administration à la seringue de mélange avec l'adaptateur **ORANGE**. Le piston de la seringue d'administration doit être **complètement enfoncé**.



8. Poussez doucement sur le piston de la seringue de mélange pour transférer la greffe dans la seringue d'administration. L'air emprisonné sera retiré pendant le transfert. Répéter les étapes 7 à 8 pour les seringues supplémentaires.




9. Détacher la seringue d'administration de l'adaptateur **ORANGE** et fixer l'embout luer et la seringue supplémentaire fournis. Injecter la greffe dans le défaut osseux.



Remarque : La prise de la greffe intervient en 20 à 30 minutes environ.

10. (FACULTATIF) Pour l'assistance mécanique, retirer le manchon du piston et enlever la pointe de la tige mélangeuse.

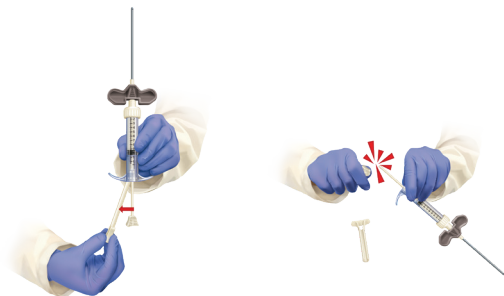

11. (FACULTATIF) Insérer la broche d'entraînement par-dessus la tige mélangeuse jusqu'à ce que vous entendiez l'écrou de la broche s'engager avec les deux languettes de la seringue. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour éjecter manuellement la greffe.



REMARQUE : Le matériau résiduel peut être laissé dans la seringue. La quantité de matériau restant dépend du respect par l'utilisateur des durées de mélange et d'injection indiquées dans ces instructions.