



## INNESTO OSSEO SOSTITUTIVO PRO-DENSE™

### ISTRUZIONI DI MISCELAZIONE


154101-0

**Le seguenti lingue sono incluse in questa confezione:**

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)	Français (fr)
Español (es)	Italiano (it)	Português (pt)	Türkçe (tk)

Per altre lingue, visitare il sito web [www.wright.com](http://www.wright.com). Quindi fare clic sull'opzione **Prescribing Information** (Informazioni sulla prescrizione).

**Per ulteriori informazioni e traduzioni, contattare il fabbricante o il distributore locale.**

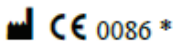

Wright Medical Technology, Inc.  
1023 Cherry Road  
Memphis, TN 38117  
U.S.A.

EC	REP
----	-----

Tornier S.A.S  
161 Rue Lavoisier  
38330 Montbonnot Saint Martin  
France

**\* Il marchio di conformità CE è applicato per numero di catalogo e, se del caso, compare sull'etichetta esterna.**

R<sub>x</sub> ONLY

Luglio 2018  
Stampato negli USA

**NOTA** – Non aggiungere alcuna sostanza supplementare all'innesto. L'uso di soluzioni di miscelazione alternative e/o l'aggiunta di altre sostanze alla miscela potrebbero compromettere la sicurezza, l'efficacia e la presa di questo prodotto.

1. Togliere la fascetta metallica dal flacone di soluzione. Collegare la siringa di miscelazione al contenitore della polvere mediante l'adattatore **ROSSO** e tirare indietro l'asta di miscelazione.




2. Capovolgere il contenitore e picchiettare per trasferire TUTTA la polvere alla siringa di miscelazione. Rimuovere il contenitore della polvere.




3. Togliere il tappo dal flacone e versare TUTTA la soluzione nella siringa di miscelazione.



4. Togliere l'adattatore ROSSO e collegare il tappo di miscelazione BIANCO. Togliere il manicotto dello stantuffo scollegando prima l'estremità dell'impugnatura dall'asta di miscelazione.

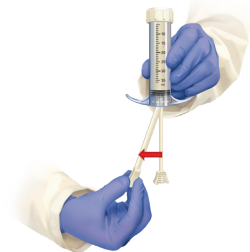


5. Miscelare per 30 secondi muovendo l'asta avanti e indietro mentre la si fa ruotare. **Assicurarsi di rompere e inglobare il "tappo" di polvere vicino alla parte posteriore e anteriore della siringa.**

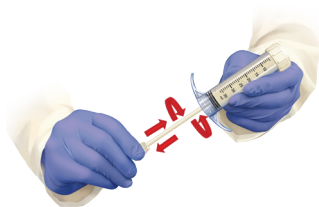

**Nota – Iniettare la pasta entro 5 minuti.**

6. Tirare **completamente** indietro l'asta di miscelazione e togliere il tappo di miscelazione. Ricollegare il manicotto dello stantuffo sull'asta di miscelazione, posizionandone l'estremità anteriore sul pistone prima di farlo scattare in sede.

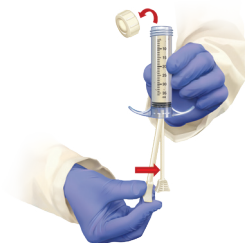

7. Collegare la siringa di erogazione alla siringa di miscelazione mediante l'adattatore **ARANCIONE**. Lo stantuffo della siringa di erogazione dovrà essere **completamente premuto**.



8. Spingere delicatamente lo stantuffo della siringa di miscelazione per trasferire l'innesto alla siringa di erogazione. L'aria intrappolata verrà rimossa durante il trasferimento. Ripetere i passaggi 7-8 per eventuali altre siringhe.




9. Scollegare la siringa di erogazione dall'adattatore **ARANCIONE** e collegare il tappo Luer e l'ago accessorio forniti in dotazione. Iniettare l'innesto nel difetto osseo.



**Nota – La presa dell'innesto richiede ~20-30 minuti.**

10. (OPZIONALE) Per assistenza meccanica, rimuovere il manicotto dello stantuffo e staccare l'estremità dell'asta di miscelazione.

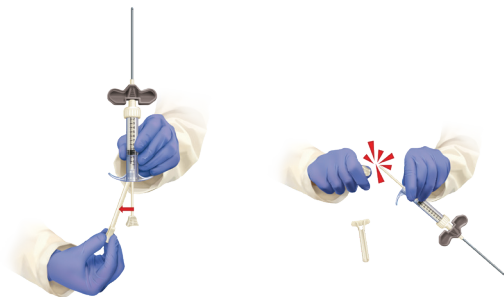

11. (OPZIONALE) Inserire il mandrino sull'asta di miscelazione fino ad avvertire l'innesto del dado del mandrino nelle due linguette della siringa. Ruotare l'impugnatura in senso orario per espellere manualmente l'innesto.



**NOTA** – Nella siringa può rimanere del materiale residuo. La quantità di materiale residuo dipende dal rispetto da parte dell'operatore dei tempi di miscelazione e di estrusione indicati nelle presenti istruzioni.