



# PRO-DENSE™-BOTGRAFTSUBSTITUUT

## MENGINSTRUCTIES


### 154103-1

**Dit pakket wordt in de volgende talen geleverd:**

|              |               |                 |               |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| English (en) | Deutsch (de)  | Nederlands (nl) | Français (fr) |
| Español (es) | Italiano (it) | Português (pt)  | Türkçe (tk)   |

Ga voor andere talen naar onze website: [www.wright.com](http://www.wright.com). Klik vervolgens op de optie **Prescribing Information** (Voorschrijfinformatie).

**Neem voor aanvullende informatie en vertalingen contact op met de fabrikant of de lokale distributeur.**

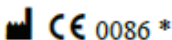

Wright Medical Technology, Inc.  
1023 Cherry Road  
Memphis, TN 38117  
U.S.A.

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

Tornier S.A.S  
161 Rue Lavoisier  
38330 Montbonnot Saint Martin  
France

**\* De CE-conformiteitsmarkering wordt toegepast naar catalogusnummer en staat op het buitenetiket indien van toepassing.**

**Rx ONLY**

Juli 2018  
Gedrukt in de VS

**PRO-DENSE™-BOTGRAFTSUBSTITUUT  
(154103-1)**

NL

**OPMERKING:** Voeg geen extra stoffen aan de graft toe. Gebruik van andere mengoplossingen en/of het toevoegen van andere stoffen aan het mengsel kan de veiligheid, doeltreffendheid en het uitharden van dit product wijzigen.

1. Verwijder het bovenstuk van de mixer en voeg al het poeder aan de kom toe.



2. Voeg de hele oplossing aan de kom toe.



3. Plaats het bovenstuk van de mixer terug en meng het geheel krachtig gedurende 30 seconden (ongeveer 50 omwentelingen).



**Opmerking: Breng de pasta in 5 minuten aan.**

4. Verwijder het bovenstuk van de mixer en pers de graft samen in de gewenste plaats met gebruik van de kleine spatel die is meegeleverd voor het aanbrengen van de graft.



5. (OPTIONEEL) Vul de spuit met graftmateriaal met gebruik van de grote spatel. Houd de spuit ondersteboven en tik ermee op de tafel om de graft beter samen te persen.



6. Bevestig de meegeleverde luerdop en canule.



7. Breng de van schroefdraad voorziene spilstaaf door de achterkant van de spuit in. Draai de handgreep om de graft te injecteren.



**Opmerking: De graft hardt uit in ongeveer 20-30 minuten.**

**Opmerking:** Er kunnen materiaalresten in de spuit achterblijven. De hoeveelheid achterblijvend materiaal hangt af van de mate waarin de gebruiker zich houdt aan de in deze gebruiksaanwijzing vermelde meng- en extrusietijd.