



SUBSTITUT OSSEUX PRO-DENSE™

INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE

150845-2

Les langues suivantes sont incluses dans ce paquet :

English (en)	Deutsch (de)	Nederlands (nl)	Français (fr)
Español (es)	Italiano (it)	Português (pt)	Türkçe (tk)

Pour d'autres langues, visiter notre site Web www.wright.com

Puis cliquer sur l'option **Prescribing Use** (Usó conforme a la prescripción).

Pour des informations et traductions complémentaires, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur local.



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Road
Memphis, TN 38117
U.S.A.

EC REP

Tornier SAS
161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
France

* Le marquage CE de conformité est utilisé par numéro de catalogue et apparaît sur l'étiquette externe, le cas échéant.

R_x ONLY

Juin 2018
Imprimé aux États-Unis

SUBSTITUT OSSEUX PRO-DENSE™
(150845-2)

REMARQUE : Ne pas ajouter de substances supplémentaires à la greffe. L'utilisation d'autres solutions de mélange et/ou l'ajout d'autres substances au mélange peuvent altérer l'innocuité et l'efficacité de ce produit. Certaines substances, comme la moelle osseuse et le sang, empêcheront la greffe de prendre.

REMARQUE : Ne pas essayer de courber l'aiguille de ce kit.

Préparation du site d'implantation et des accessoires

1. Prépositionner l'aiguille au niveau de la perte osseuse sous radioscopie.
2. Retirer le couvercle du mélangeur et ajouter toute la poudre et la solution.



3. Replacer le couvercle et brancher le flexible à la prise de vide. (En option)



- 4a. **MÉLANGER** environ 50 tours en 30 secondes (dans un sens).



- 4b. **ARRÊTER** de mélanger et attendre environ 30 secondes avant de passer à l'étape 4c.



- 4c. **MÉLANGER** environ 25 tours en 15 secondes (dans un sens).

Remarque : Injecter la pâte dans les 3 à 5 minutes.



5. Débrancher le flexible de la prise de vide (le cas échéant), enlever le couvercle et racler l'excès.



6. Retirer l'ergot rouge et tourner la base blanche dans le sens antihoraire pour faire apparaître l'orifice de la seringue.



7. En tenant le mélangeur sur le côté, introduire l'extrudeuse fileté à un angle jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place, et l'avancer jusqu'à ce que la greffe commence juste à pénétrer l'orifice de la seringue comme le montre l'image.



8. Enclencher le corps de la seringue en position verticale. Tout en saisissant la chambre transparente, continuer de faire avancer en tournant l'extrudeuse jusqu'à ce que la seringue soit remplie.



9. Débrancher la seringue.



10. Arrimer la seringue à l'aiguille prépositionnée. Commencer l'injection en exerçant une pression régulière avec le pouce. Éviter de trop remplir ou de pressuriser le site à traiter.



Remarque : La prise de la greffe intervient en 20 à 30 minutes environ.

REMARQUE : Le matériau résiduel peut être laissé dans la seringue. La quantité de matériau restant dépend du respect par l'utilisateur des durées de mélange et d'injection indiquées dans ces instructions.

MISE EN GARDE : Il est nécessaire de laisser prendre la pâte avant de positionner définitivement le matériel. Ne pas déranger pendant la polymérisation.