

6. Retire a patilha vermelha e rode a base branca no sentido contrário aos ponteiros do relógio para expor a porta da seringa.



7. Segurando o misturador de lado, insira o extrusor roscado num ângulo até que completamente assente e avance o extrusor roscado até que o êxert apenas comece a entrar na porta da seringa, tal como é mostrado.



8. Pressione o cilindro da seringa numa orientação vertical, para o encaixar. Enquanto segura na câmara transparente, continue a rodar/avançar o extrusor até a seringa estar cheia.



9. Separe a seringa.



10. Adapte a seringa à agulha pré-colocada. Comece a injectar, aplicando uma pressão constante do polegar. Evite o enchimento excessivo ou a pressurização do local de tratamento.



Nota: O enxerto endurecerá em aproximadamente 20 min a 30 min.

NOTA: O material residual poderá ficar na seringa. A quantidade de material restante diz respeito à observância, por parte do utilizador, dos tempos de mistura e ejeção descritos nestas instruções.

PRECAUÇÃO: Deve deixar a pasta endurecer antes da colocação de equipamento definitivo. Não perturbe durante a cura.