



## CELLPLEX<sup>®</sup> TCP Mixing Instructions

129737-3

Les langues suivantes sont incluses dans ce paquet :

English (en)

Deutsch (de)

Nederlands (nl)

Français (fr)

Español (es)

Italiano (it)

Português (pt)

中文-Chinese (sch)

Türkçe (tk)

Pour d'autres langues, veuillez visiter notre site web [www.wmt.com](http://www.wmt.com)

Puis cliquez sur l'option **Prescribing Information** (Informations pour la prescription).

Pour des informations et traductions complémentaires, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur local.



CE 0086\*

Wright Medical Technology, Inc.  
P.O. Box 100  
Arlington, TN 38002  
U.S.A.

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

Wright Medical EMEA  
Krijgsman 11  
1186 DM Amstelveen  
The Netherlands

**\* Le marquage CE de conformité est utilisé par numéro de catalogue et apparaît sur l'étiquette externe, le cas échéant.**

**Rx ONLY**

Novembre 2009

Imprimé aux États-Unis

TCP CELLPLEX™  
Os spongieux synthétique

Mode d'emploi

ÉTAPE 1

À l'aide de la seringue et de l'aiguille fournies, prélever de la moelle osseuse selon la technique normale. Mettre de côté.

---

Volume minimum  
recommandé du  
prélèvement

---

|       |           |
|-------|-----------|
| 7 cc  | 10 –12 cc |
| 15 cc | 18 –20 cc |

---



ÉTAPE 2

Retirer le capuchon Luer de la chambre d'injection de la moelle INFILTRATE™. Le capuchon Luer est situé à extrémité opposée de l'écran amovible.



### ÉTAPE 3


Attacher la seringue remplie de moelle osseuse à la chambre d'injection de la moelle INFILTRATE™. L'extrémité correcte comporte une étiquette « Attacher la seringue ».



### ÉTAPE 4

Effectuer l'injection pour remplir autant que possible la chambre d'aspirat de moelle osseuse.

**REMARQUE :** l'écran amovible empêchera la moelle osseuse superflue de filtrer à travers les granulés de TCP CELLPLEX®.

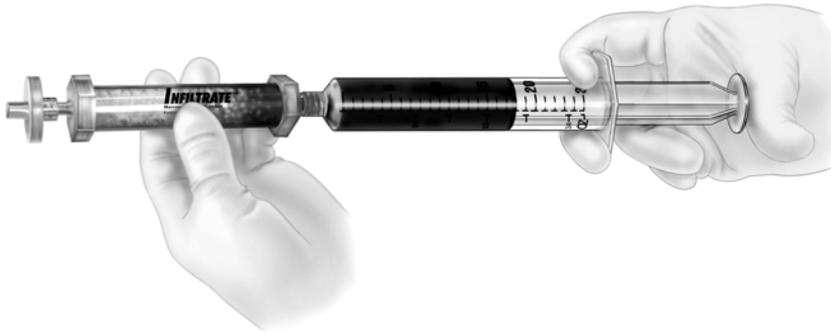

### ÉTAPE 5

**Laisser coaguler le composite de moelle osseuse et de TCP CELLPLEX®**

Ne pas déranger la chambre ayant reçu l'injection de moelle pendant 10 à 15 minutes pour permettre la coagulation.


**REMARQUE :** si un agent de coagulation a été utilisé à l'étape 3, la durée de coagulation est inférieure à 5 minutes.



## ÉTAPE 6

### **Retirer le composite TCP CELLPLEX™**

Retirer les capuchons des extrémités de la chambre d'injection de la moelle INFILTRATE™. Utiliser la tige-poussoir fournie pour éjecter le composite TCP CELLPLEX™.

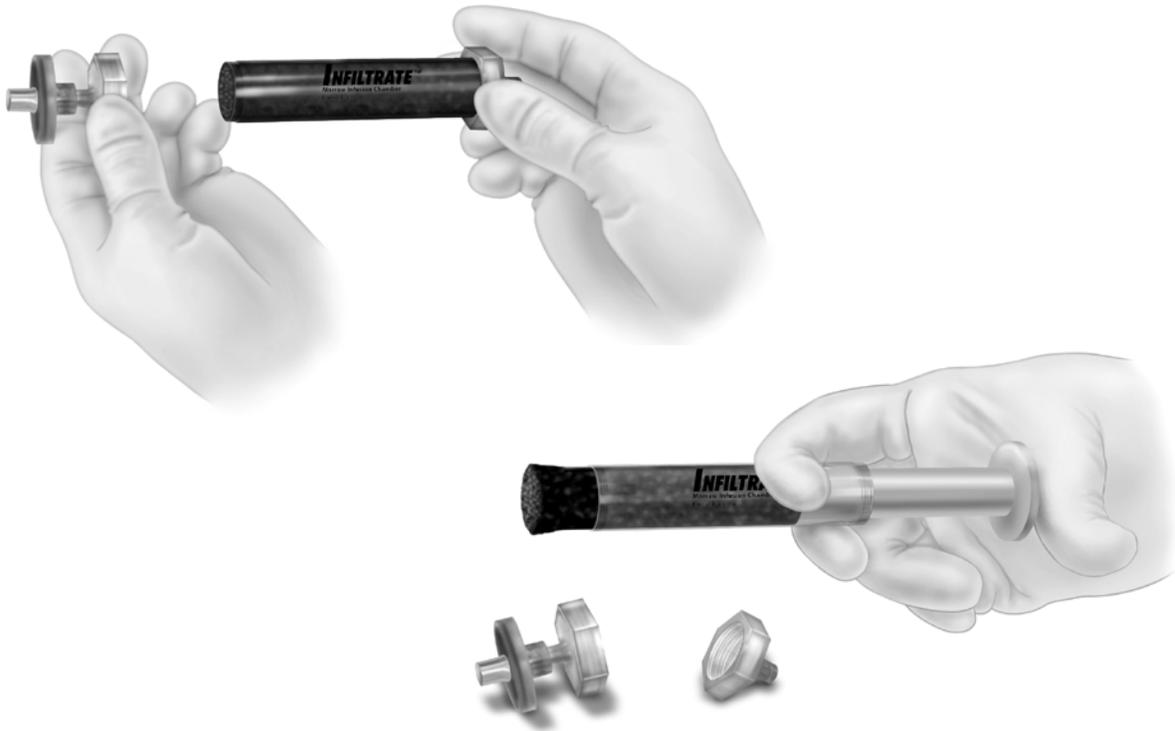

## ÉTAPE 7

### **Planter le composite TCP CELLPLEX™**

Tasser délicatement le composite TCP CELLPLEX™ dans le site du défaut.

